

Votre nouveau spray de refroidissement

Septodont



CryoPulp

Spray de refroidissement
arôme menthe




CryoPulp - le nouveau spray de refroidissement de Septodont


CryoPulp convient pour le givrage rapide de pellets pour le test de sensibilité pulpaire en dentisterie et le refroidissement des matériaux pour empreintes comme l'hydrocolloïde, etc.

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Buse d'application	Pulvérisation précise	Utilisation facile et sûre
Gaz butane-propane	Bon pouvoir de refroidissement	Efficace
Parfum menthe	Agréable	Acceptation des patients

Consignes d'utilisation:

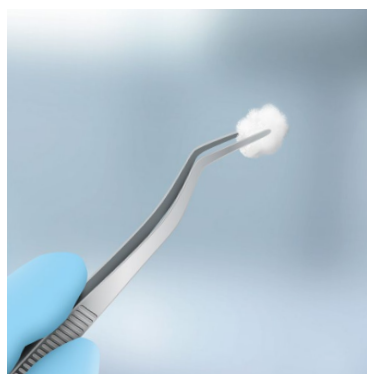

Utiliser un pellet en coton

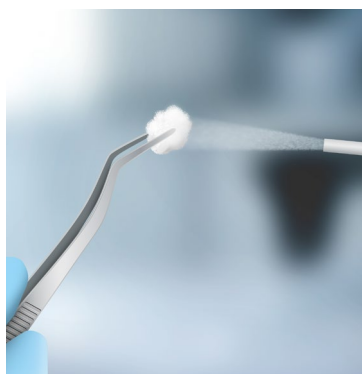

Pulvériser 1 à 2 secondes à une distance de 2 à 3 cm



Le pellet doit être appliqué sur la zone médiane de la dent. Les dents «normales» adjacentes ou contra-latérales doivent également être testées.

Information produit

- 200 ml
- Température de sortie $\leq -40^{\circ}\text{C}$
- Dispositif médical de classe I
- Code article: 10601X



Distributeur:

Septodont NV - SA - Avenue de la Constitution 87 – 1083 Bruxelles- Belgique

Tél. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Pour plus d'informations visitez notre site web:

www.septodont.be

