

Votre NOUVEAU fil de rétraction Septodont



Fil tricoté
100% coton
pour une
meilleure
expansion

Septofil N

Fil de rétraction tricoté
Non imprégné



Septofil N fil de rétraction gingival tricoté non imprégné

Destiné au déplacement gingival temporaire.

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
100% coton	Matière naturelle	Permet un contrôle efficace du degré d'hydratation tout en minimisant l'irritation gingivale
fil de rétraction tricoté	Réseau de mailles tricotées	Meilleure absorption et expansion
Pas d'agent de blanchiment fluorescent	Coton traité naturellement	Minimise les risques d'effets secondaires

Recommandation d'utilisation

Taille	Technique du fil unique	Technique du double cordon
0 ⁴	incisive antérieure inférieure avec une gencive fine et inadéquatement fixée	comme fil inférieur, en particulier dans les gencives fines et mal fixées des incisives antérieures inférieures
0 ³	dents antérieures avec gencive fine fixée	comme fil inférieur pour les tissus gingivaux fins
0 ²	dents antérieures	comme fil inférieur pour les tissus gingivaux épais, comme fil supérieur pour les tissus gingivaux fins
0	prémolaires	comme fil supérieur pour les tissus gingivaux fins
1	molaires	comme fil supérieur pour les tissus gingivaux épais
2	molaires et surtout la zone de l'opercule de la dent postérieure	comme fil supérieur pour les tissus gingivaux très épais



Information produit:

- 6 références, 254 cm



Distributeur:

Septodont NV - SA - Avenue de la Constitution 87 - 1083 Bruxelles - Belgique

Tél. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

pour plus d'informations visitez notre site web: www.septodont.be

